

類別:機械器具73補聴器 管理医療機器

JMDNコード:30082000 一般的名称:ポケット型補聴器

販売名:補聴器 ME-181

【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。

【補聴器や電池は飲み込むと危険である。】

大きな音で聞き続けられないこと。

【大きな音で聞き続けると、更に聞こえを悪くすることがある。
また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で
使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。】

他人に補聴器を貸さないこと。

【他人の耳を傷めることがある。】

かゆみやかぶれに注意すること。

【体質によって、かゆみやかぶれを生じる場合がある。
皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談する
こと。】


(5) 音質を調整する。

(6) 使用を終了する場合は、電源を切り、補聴器の耳せん
部分を耳あなからはずす。

【使用上の注意】

- ・次の場合は補聴器の使用を中止すること。
耳漏、耳垢、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、
痒み、湿疹が認められるとき。
- ・取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。
- ・MRI（磁気共鳴画像診断装置）の診断を受けるときや、
マイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を使用して
治療する場合は補聴器を外すこと。
- ・大きな音で聞き続けると耳を傷めることがある。

【形状・構造及び原理等】*

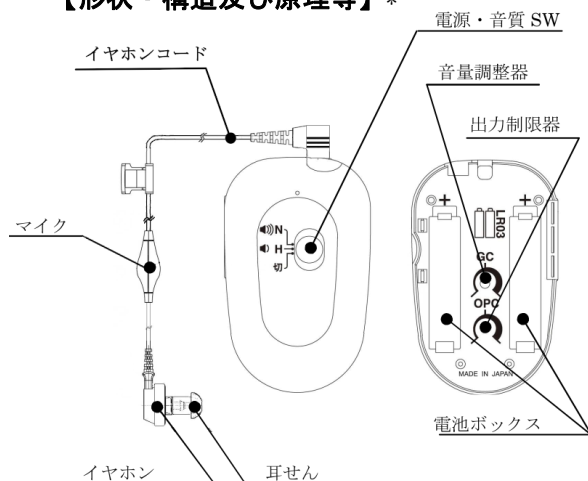

寸法/質量: 79×49×16mm / 約62g(電池含む)

材質: 本体 ABS樹脂
耳せん シリコン

単4形アルカリ乾電池:LR03 1.5V 2個

原理: 音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより聴力を補う

電撃保護: 内部電源機器 B形装着部

【保管方法及び使用期間等】

直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、室温で
保存すること。

保管環境: -10～50℃ 30～90%RH 50k～106kPa

電池寿命: 約200時間

電池寿命は、電池の種類または使用条件によって異なる場合
がある。

【保守・点検に係わる事項】

補聴器本体や電池は、柔らかい布等を使用してお手入れをして
ください。詳細は、取扱説明書の「お手入れ」の章を参照して
ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 株式会社三和製作所

TEL: 0120-331-756

製造業者: 株式会社三和製作所 メディケアカンパニー

ミミー電子事業部

【使用目的又は効果】

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること

【使用方法等】

- (1) 電池を入れる。
- (2) イヤホンコードを補聴器に取付ける。
- (3) イヤホンの耳せん部分を耳あなに入れる。
- (4) 電源を入れる。

取扱説明書を必ず参照してください。