



# ミミー 補聴器別売商品のご紹介

## ミラベル

※ 価格はすべて消費税別です。

商品名	税抜価格	部品写真
<b>イヤホンコード (75cm)</b> 使っているうちに雑音や断音が出るようになったら交換してください。	680 円	
<b>イヤホンコード (250cm)</b> 使っているうちに雑音や断音が出るようになったら交換してください。	1,200 円	
<b>イヤホンN型 (ミミー用)</b> <b>イヤホンW型 (ミラベル用)</b>	1,500 円 3,150 円	
<b>ジョイント</b> イヤホンと耳せんをつなぐために必要です。	250 円	
<b>耳せん</b> ハウリング防止の為、ご自分の耳あなにピッタリのサイズをお使いください。	各 250 円	
<b>首掛け補聴器袋 (グレー)</b> 外出・家事・園芸等両手を使う作業に便利。	600 円	
<b>ポケットループ</b> テレビ・ラジオ等を楽しむのに最適。 (補聴器のMTスイッチをTにして使用) ※テレビ等のイヤホン端子へ接続するとテレビ等からの音声は消えます。	2,000 円	

ご注文はお電話、FAX、お葉書、メールにて承ります。

- 部品代金の他に送料を申し受けます。
- 注文品と数量、お客様のお名前、ご住所、お電話番号もお忘れなくお知らせください。
- お支払いは商品と同封の郵便振替用紙にてゆうちょ銀行よりお願いいたします。

ミミー電子株式会社


〒190-0003 東京都立川市栄町 6-16-1  
TEL042-538-3316 FAX042-538-3317  
補聴器サポートセンター TEL0120-331-756  
営業時間 10:00~18:00 (土、日、祝休)  
E-mail アドレス support@mimy.co.jp

お手入れ 一週間に一度はお手入れをしましょう。


イヤホンから耳せんを取り外し、耳せんだけをぬるま湯の石鹸水で洗って下さい。

イヤホンはアルコールを湿した布でよく拭いて下さい。  
ジョイントに耳垢が詰まってしまうたらジョイントも取り外して洗って下さい。

耳せん、ジョイントは完全に乾いてからイヤホンに取り付けて下さい。

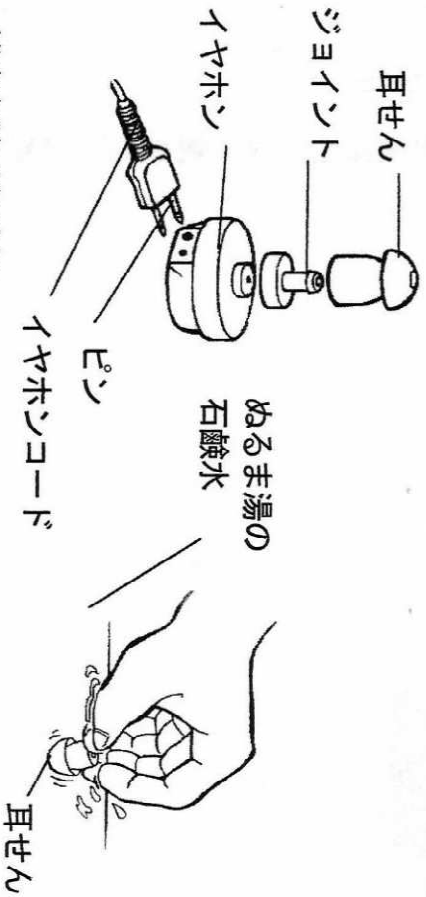

雑音を防ぐために  
イヤホンからイヤホンコードを外し、反対側も補聴器のイヤホンコンセントから外し、コードの先端の銀色の2本のピンをアルコール消毒液を湿した布で目に見えない埃を良く拭いて下さい。

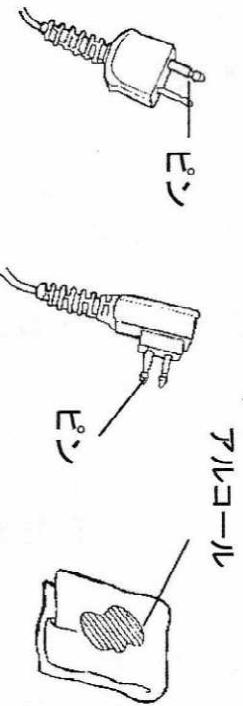

補聴器の本体はアルコールを湿した布で良く拭いて下さい。

故障かな？と思ったら

● 修理に出す前にお読み下さい。

症状	対策
ブーという音しかしない	M.トススイッチを“M”にする 新しい電池に交換する
ピーという音がする	耳孔に耳せんをびったり挿入する 耳せんの大きさを変えてみる
音が小さい	耳せんの耳垢を掃除する 電池の+、-が逆になっていないか 点検する 新しい電池に交換してみる
音が出ない	M.トススイッチをMにする ボリュームツマミで音量を上げてみる 調整ツマミで音質を変えてみる
音がハッキリしない	新しいイヤホンコードと交換する コードの先端のピンのお手入れをする イヤホンを交換する
雑音が出る	

これらの対策で直らない時は販売店又は下記  
補聴器サポートセンターへお問い合わせください。

ミミー電子(株)

補聴器サポートセンター

〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1

TEL 042-538-5733 FAX 042-538-3317

営業時間 10:00~18:00(土、日、祝日 休)



MIMY®