

一般的名称:耳あな型補聴器

販売名:ハピネス M-02 耳穴型デジタル補聴器

### 【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。

補聴器や電池は飲み込むと危険である。

大きな音で聞き続けられないこと。

大きな音で聞き続けると、更に聞こえを悪くすることがある。

また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。

他人に補聴器を貸さないこと。

他人の耳を傷めることがある。

かゆみやかぶれに注意すること。

体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がある。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談すること。

(相手の声や周囲の音の大きさに応じてこまめに調整して下さい)

音質は自分の聞きやすい音に調整できます。


詳細は、付属の「取扱説明書」を参照して下さい。

### 【使用上の注意】

1. 次の場合は補聴器の使用を中止すること。  
耳漏、耳垢、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、痒み、湿疹が認められる時。
2. 取扱説明書に従い、指定の電池を使用する事。
3. MRI(磁気共鳴画像診断装置)の診断を受けるときや、マイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を使用して治療する場合は補聴器を外すこと。
4. 大きな音で聞き続けると耳を傷める事がある。

### 【形状・構造及び原理等】

A. 構成 (詳細の構成は付属の「取扱説明書」を参照の事)

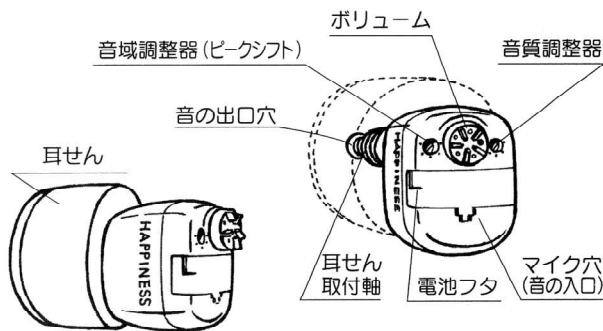

B. 寸法: W11×H13×D14(mm)

重さ: 約1.8g(電池、耳せん含む)

C. 材質: 本体 ABS樹脂

耳せん 低反発性ウレタン

D. 使用電池: 空気電池312(PR41) 1.4V 1個

原理: 音を適切な大きさに増幅して耳に伝える事により、聴力を補う。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光の当たる場所、高温多湿の場所を避け、室温で保存する事。

保管環境: -10~50°C 30~90%RH

電池寿命: 約100時間~170時間

電池寿命は、電池の種類または使用条件によって異なる場合がある。

### 【保守・点検に係わる事項】

補聴器本体や電池は、柔らかい布等を使用してお手入れをしてください。詳細は、付属の「取扱説明書」を参照してください。

### 【包装】 片耳 / 1箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 製造販売業者

・ミミー電子株式会社

〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1

TEL:042-538-3316 FAX:042-538-3317

#### 製造業者

・スターキーメキシコ (Starkey Mexico S.A de C.V.)

ダイアゴナル ロレンドー デラ ガーザ ローテ3 マタモラス, タマウリパス  
メキシコ 87499 (Diagonal Lorenzo de la Garza Lote 3 Ciudad Industrial  
de Matamoros, H.Matamoros, Tamaulipas CP 87499 Mexico)

・スターキージャパン株式会社

神奈川県横浜市都筑区仲町台5-2-20

・ミミー電子株式会社

東京都立川市栄町6-16-1

### 【使用目的・効能又は効果】

耳せんを耳に差し込んで使用し、難聴者の聴力を補うレディーメイドタイプ補聴器。

### 【品目仕様等】

90dB最大出力音圧レベル(ピーク値): 128dB以下

最大音響利得(規準周波数): 42dB

電撃保護: 内部電源機器 B形装着部

### 【操作方法又は使用方法等(用法・用量を含む)】

耳せんを押しつぶし、細くしてから耳の穴の中に入れ、本体で増幅した音を聴きます。聞きやすい音の大きさに合わせます。

**取扱説明書を必ず参照してください。**